


4-4-2.DICOM CD 画像の登録





DICOM 形式に対応した CDROM が存在する場合は、以下の手順となります。

- ① 画像登録ボタンをクリックする。(左記画面が表示されます。)
- ② 項番1の画像アップローダの起動の、「起動」をクリックする。

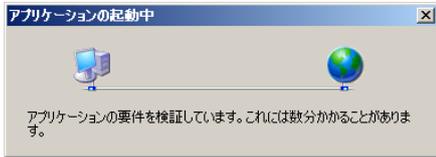


「画像アップローダ」という専用ソフトが自動的にインストールされます。


- ③ 下記ウインドウが表示されたら、「インストール(I)」をクリックします。
(暫くインストール中であることを示すウインドウが表示されます。)

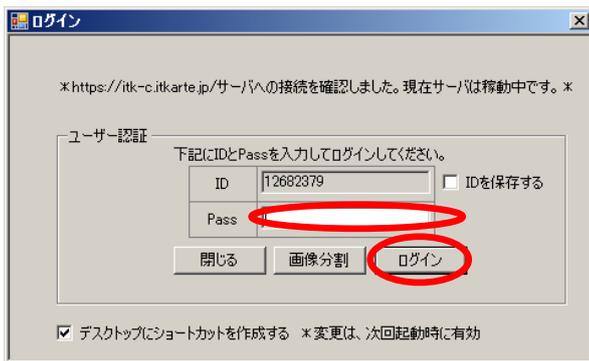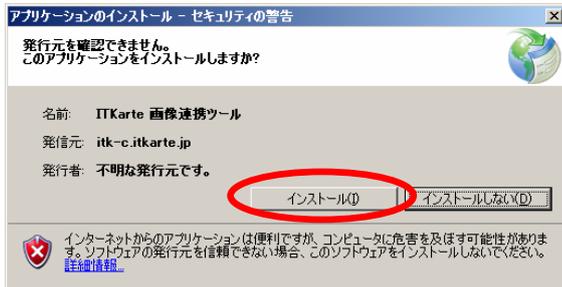

- ④ パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

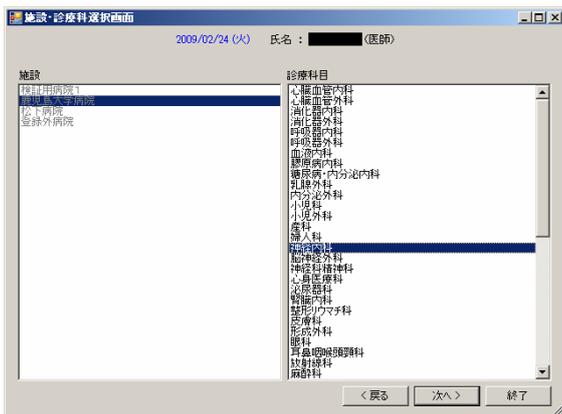

- ⑤ 診療科を選択します。(既定の診療科が選択されているので、そのままOK)

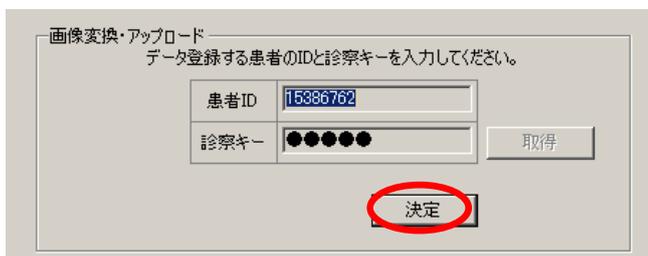

- ⑥ 患者 ID が表示されるので、「決定」ボタンをクリックします。

(次ページへ続く)